

3 電源方式吸引器をご利用のお客様へ ～充電式内蔵バッテリーの適正な使用方法について～

エマジン小型吸引器 3WAY-750 は、コンセント、シガーソケットに加え、充電式内蔵バッテリーで運転できる 3 電源方式の小型吸引器です。

バッテリーは適正な使用方法でお使いいただくことにより、消耗を抑え寿命を長く保つことができます。

■ ご購入後、はじめてお使いになる前に、必ず充電を行ってください。

本器はバッテリーを充電して出荷しておりますが、ご使用前には取扱説明書（7 ページ）をお読みいただき、満充電を行ってからご使用ください。


■ 通常運転、またはバッテリーの充電ができない場合の対処方法について。

本器はバッテリーの充電残量が極端に少ない場合や、強い電磁波を発生する機器の近くで使用した場合に、通常運転またはバッテリーの充電ができない事があります。

この時、通常動作と異なるランプの点灯や警告音が鳴る場合があります。

その場合は以下の手順に従ってご対応ください。

- ① 運転スイッチを OFF にしてください。
- ② 電源プラグをコンセントに接続して 3 分ほどお待ちください。
※警告音が鳴っている場合でもそのままお待ちください。
- ③ 電源プラグをコンセントから外してください。
- ④ 30 秒ほど、そのままお待ちください。
- ⑤ 電源プラグをコンセントに接続し、充電中を示す赤色の点滅になることを確認してください。
上記のご対応でも正常な運転または充電ができない場合は、販売店へ修理をご依頼ください。

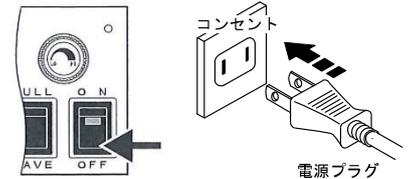

■ バッテリーの使用直後は時間をあけてから充電を開始してください。

使用直後は、バッテリーの温度が上昇し、充電ができない場合がございます。

これは、温度上昇によるバッテリーを保護するために安全回路が作動したもので故障ではありません。

その場合は、バッテリーの熱が十分にさめてから、再度電源プラグをコンセントに接続し、充電を行ってください。

■ 定期的なバッテリーのリフレッシュを行ってください。

バッテリーは、使用しなくてもわずかながら自己放電をしています。

長期間、吸引器をご使用にならない場合でも、1 ヶ月に一度はバッテリーのリフレッシュ（充放電）を行ってください。

また、予備バッテリーをご用意いただき、吸引器本体のバッテリーと併用しながら約 1 ヶ月ごとの交換使用もお奨めいたします。

使用環境などにより異なりますが、バッテリーは充放電を約 500 回繰り返すと、充電量が極端に少なくなります。

正しく充電しても使用時間が著しく短くなった場合は、寿命とお考えいただき、お早めに新しいバッテリーと交換してください。

* 充電式内蔵バッテリー：標準価格 8,000 円（税別）