


ブルークロスシリコンレサシターをご使用のお客様へ

ご注意頂きたい事項

- ・ 本器のご使用前に、必ず取扱説明書及び添付文書をご覧いただき、ご理解の上ご使用下さい。
- ・ 構成部品は当社専用品をご使用下さい。
- ・ 他社製の構成品を接続しての使用は絶対にしないで下さい。
- ・ 異なる機種別の構成品を接続しての使用は絶対にしないで下さい。


組み立て後、ご使用前の注意点

- 各構成部品が取り付けられ、接続部（赤枠）がしっかり接続されていることを確認して下さい。

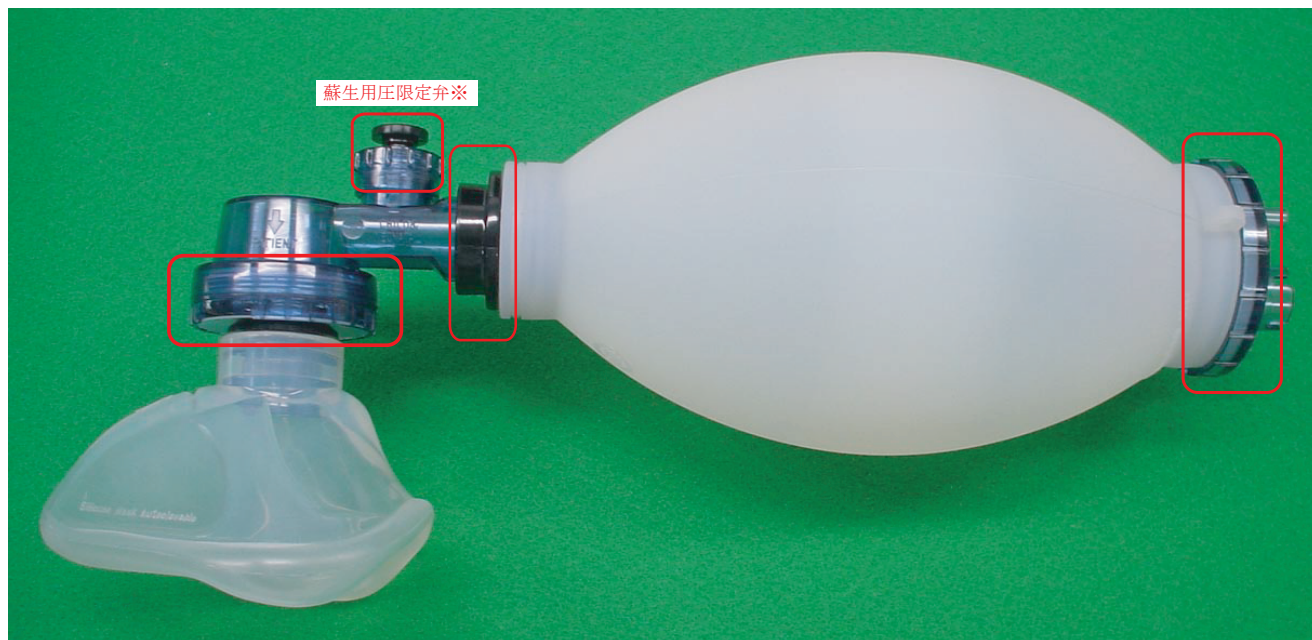


※蘇生用圧限定弁は小児新生児兼用のみ

- 各弁が取り付けられていることを確認して下さい。

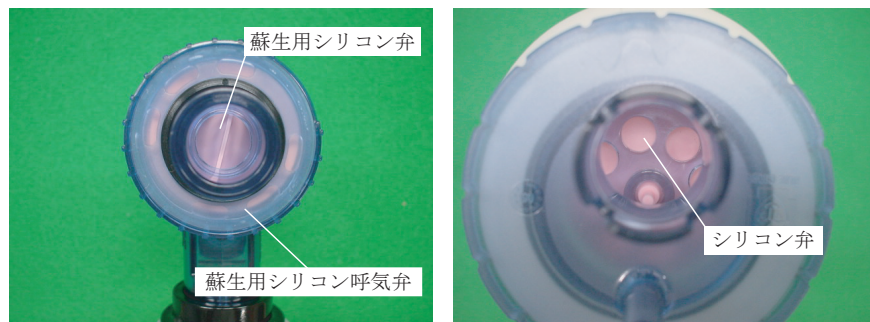


- シリコンマスク・酸素チューブは矢印の所まで差し込んで下さい。
取り付け後は、接続部がしっかり接続されていることを確認して下さい。

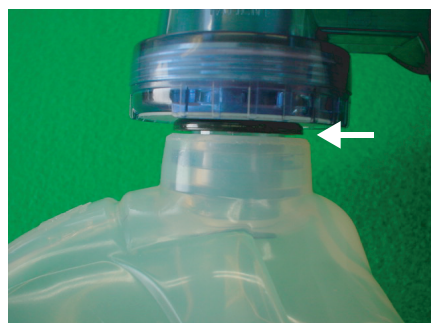

シリコンマスク
(成人用：大・中・小)



シリコンマスク
(新生児用：大・小)

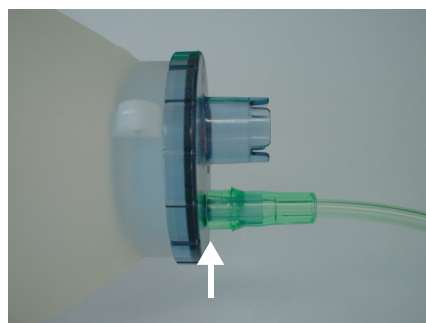

酸素チューブ